

1. Desinfectar el área de extracción usando los productos incluidos.



2. Preparar la bolsa estéril sacándola de su embalaje.



3. Quitar el tapón de la aguja.



4. Pinchar el cordón umbilical en el área desinfectada. Recoger tanta sangre como sea posible. Es necesario un mínimo de 60ml (100 gr. aprox.).



5. Una vez llena la bolsa de sangre, cerrar con dos nudos de seguridad antes de sellar el conducto.



6. Mover despacio la bolsa, a fin que la sangre quede mezclada con el anticoagulante CPD que contiene en su interior.



7. Pegar la etiqueta de ID roja a la bolsa de sangre y forrar con la tela absorbente o el papel de seda incluido en el kit, antes de envolverlo con el refrigerante líquido. Introducirlo en la bolsa transparente con autocierre y, a su vez, ésta en el sobre metálico adjunto a tal efecto.



8. Asegurarse de incluir la sangre de la madre para el análisis por PCR incluido en el kit.



9. Colocar la muestra tomada y la muestra materna en la caja blanca. Una vez finalizado el proceso, póngase en contacto con Cordvitae y un transporte de muestras biológicas recogerá su muestra para enviarla a nuestro biobanco



Se aconseja realizar este proceso antes de la salida de la placenta. En caso de no poderse realizar de este modo, no se preocupe, una vez expulsada, desinfecte el área conveniente y siga los pasos descritos arriba.